

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0022，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1008.0021，适用于操作系统版本 008

2 新功能

已整合以下新功能：

- 新增用于服务和生产的不同功能。

3 改进

进行了以下改进：

- MAC 地址在 [系统 ▶ 关于...](#) 中显示 (TITR-28395)。
- 一旦显示屏出现一条信息，则系统无法关机。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 复制一个方法段时，方法段数据被覆盖 (TITR-28967)。
- 如果激活了报告，则 \$Q 命令失效。
- 更改了报告参数后，[由方法段生成报告](#) 无法打印。
- 如果加载了一个新的方法段并按下了 **[停止]** 按键，则 [实时状态](#) 和 [结果](#) 显示屏界面将被取消激活。

5 已知问题

已知有以下错误：

- 通过再计算可以轻松更改曲线的 x 轴（对于 10 mL 停止体积）。