

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障：

- 57.1027.0004，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1027.0003，适用于操作系统版本 006

2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

已得到以下改进：

- 可以更灵活地配置 PDF 报告。
- PDF 报告计时得到改善

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 滴定度测定后不使用新的滴定度（TITR-19927）。
- SMN 计算的问题（TITR-20132）。
- 电极检查期间的错误 **电极损坏 011-002**（TITR-18630）。
- 打印报告始终是 5 页长（TITR-20151）。

5 已知的错误

以下错误是已知的：

- 无