

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.916.0042

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.916.0041

## 2 Neue Funktionen

Keine

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Änderungen von Datum, Zeit und Zeitzone werden im Audit Trail dokumentiert.

## 4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Nach dem Ausdrucken des Logioptionenreports und anschliessendem Methodenstart fror die Benutzeroberfläche ein.
- Falls während des automatischen Benutzerlogouts eine Meldung auf der Benutzeroberfläche vorhanden war, blieb das System im Logindialog hängen.
- Falls während des Gerätestarts der Logindialog schnell bestätigt wurde, konnte das System im Benutzerlogin ohne Passwort hängen bleiben.
- In einigen Fällen wurde der Dosierer am Ende der Titration nicht gefüllt und die Methode blieb beim Füllen hängen.
- Aus dem Dialog «Passwort ändern» konnte ein Methodenstart ausgelöst werden, obwohl kein Benutzer angemeldet war.



- Falls im Resultatreport des Elektrodentests (ELT) die Sensordaten aktiviert waren, wurde der Resultatreport nicht richtig ausgegeben.

## **5 Bekannte Fehler und Probleme**

Keine

## **6 Übereinstimmung**

Die vorliegende Firmware-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität des Produkts in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.